



**Biolabs
International**

Factory Direct Distribution

ClickZip Jeringa de seguridad con Aguja retráctil

**ClickZip™ es el futuro
en la agujas de seguridad**

ClickZip™ evita la reutilización y las lesiones por pinchazo de aguja debido a su innovadora tecnología de aguja inclinada que encapsula la aguja en el cilindro de la jeringa.



Descripción de la tecnología

ClickZip™ ha sido diseñado específicamente, sin una función de seguridad adicional, para usarse exactamente como una jeringa tradicional con el beneficio adicional de un mecanismo de bloqueo que "hace clic" en su lugar cuando la aguja está completamente presionada. Cuando el émbolo está completamente presionado después de la inyección, el émbolo se enganchará fácilmente con el mecanismo de retracción, momento en el cual se escuchará un 'clic' audible que permitirá al usuario tirar del émbolo hacia atrás, arrastrando la aguja a través del buje hacia el interior del cañón e inclinándola hacia un lado. A continuación, se rompe el émbolo dejando la aguja encapsulada de forma segura en el cilindro para su eliminación fácil y segura. Esta acción cumple con las normas de prevención de reutilización (RUP). No se requieren técnicas especiales para utilizar el mecanismo de seguridad. En todo momento es posible una visualización clara del lugar de la inyección. El mecanismo muestra claramente que la aguja está contenida en el cilindro de la jeringa. Después de las técnicas estándar de inyección, todas las partes de la jeringa se desechan según los protocolos de la organización.

La innovadora gama ClickZip™ incluye la jeringa de seguridad retráctil con aguja ClickZip™ con su aguja de bisel triple de alta calidad diseñada para aumentar la comodidad del paciente. Un sistema de administración inyectable con aguja retráctil manual de alta calidad. Sin fugas y mínimo espacio muerto.

Los productos ClickZip™ de Numedico brindan una mayor seguridad a la industria de la salud al reducir las lesiones por pinchazos de agujas, prevenir la reutilización de agujas y disminuir las infecciones por patógenos transmitidos por la sangre. El uso generalizado de esta tecnología se preocupa principalmente por la seguridad de la comunidad y su salud a largo plazo.

ClickZip™ cumple con los estándares internacionales para dispositivos médicos y las recomendaciones de OSHA para dispositivos de seguridad contra pinchazos.

Características y beneficios de la tecnología ClickZip™

Características	Beneficios
Cánulas de acero inoxidable de diseño japonés de la más alta calidad.	Aguja afilada para reducir el dolor del paciente.
Sin látex.	Elimina las sensibilidades al látex.
Ninguna fuga.	Evita la contaminación.
Sin espacio: espacio muerto mínimo.	Reducción de la supervivencia viral.
Tecnología de aguja retráctil activa: retracción manual.	Mayor control del usuario.
Una vez administrada la inyección, el usuario puede retraer la aguja antes o después de retirarla del paciente.	Reducir la exposición de la aguja al aumentar el control y la seguridad de los usuarios.
Sin cambios en la técnica de inyección.	No se requiere capacitación o es mínima: fácil de usar.
Cuando se retrae después de su uso, la aguja se inclina hacia un lado dentro del cilindro de la jeringa.	Encapsular la aguja en el cilindro de la jeringa aumenta la seguridad, reduce el riesgo de pinchazos, evita la reutilización de la aguja y reduce la necesidad de un recipiente para objetos punzantes.
El barril incorpora el tope trasero de la aguja.	Evita que la jeringa se desmonte.
La característica de seguridad es una parte integral del dispositivo.	No es necesario "agregar" funciones de seguridad, no se requiere operación adicional y tecnología fácil de usar.
El usuario puede oír y sentir cuando se activa el mecanismo de bloqueo.	El usuario sabe cuándo se ha administrado correctamente la inyección, lo que aumenta la confianza del usuario. Cumple con la recomendación de NIOSH para dispositivos de pinchazo de aguja.
Después de la retracción de la aguja, el émbolo se rompe para encapsular la aguja usada.	Eliminación segura después del uso y mayor prevención de reutilización o lesiones por pinchazos.
Romper el émbolo.	Evita la reutilización.
Cumplimiento total del Sistema de Calidad ISO para Fabricación.	Cumple con los estándares internacionales para dispositivos médicos.
Costo de fabricación reducido.	Costo competitivo frente a otros dispositivos médicos diseñados para la seguridad.
Flexibilidad de la tecnología ClickZip™.	Compatibilidad con varios dispositivos médicos para extraer e inyectar medicamentos y drogas.

Instrucciones de uso

La jeringa de seguridad retráctil con aguja ClickZip™ se debe utilizar para la inyección intramuscular o subcutánea de medicamentos en un paciente y está destinada a prevenir lesiones por pinchazos de aguja.



PASO 1 | ABRIR

- > Siga los procesos de higiene y EPP.
- > Abra la envoltura de papel desde la parte superior separando el papel y despegando hacia abajo.
- > Quitar la tapa de seguridad.


ADVERTENCIA

NO presione el émbolo hasta el final para evitar activar el mecanismo de seguridad.




PASO 2 | EXTRAER

- > Asegúrese de que la aguja esté bien ajustada.
- > Extraiga el medicamento.
- > Utilice una técnica aséptica estándar para llenar la jeringa.

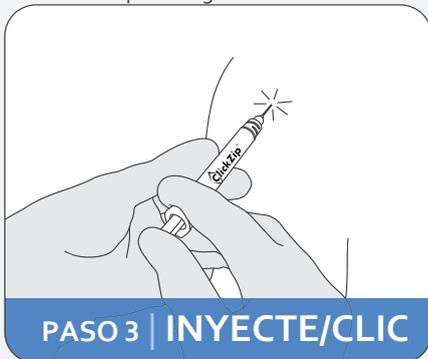

PASO 3 | INYECTE/CLIC

- > Inyecte el medicamento presionando completamente el émbolo para enganchar el mecanismo de bloqueo.
- > El usuario debe sentir y escuchar un clic.
- > Retire la jeringa / aguja del paciente.

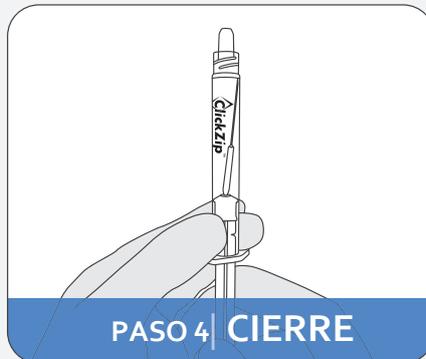

PASO 4 | CIERRE

- > Retire (cierre) el émbolo hacia atrás para retraer con seguridad la aguja en el cilindro.
- > La aguja se inclinará hacia un lado para evitar pinchazos con la aguja y su reutilización.




PASO 5 | QUEBRAR

- > Quitar el émbolo en el punto de rotura.
- > Deseche la unidad completa según su política.

Estructura del producto de la tecnología ClickZip™

"Jeringa de seguridad retráctil con aguja ClickZip™" es una jeringa de seguridad con aguja estéril retráctil de un solo uso (Jeringa RUP) que incluye una función que atrae la aguja hacia el interior del cilindro de la jeringa y está destinada a evitar lesiones por pinchazos.

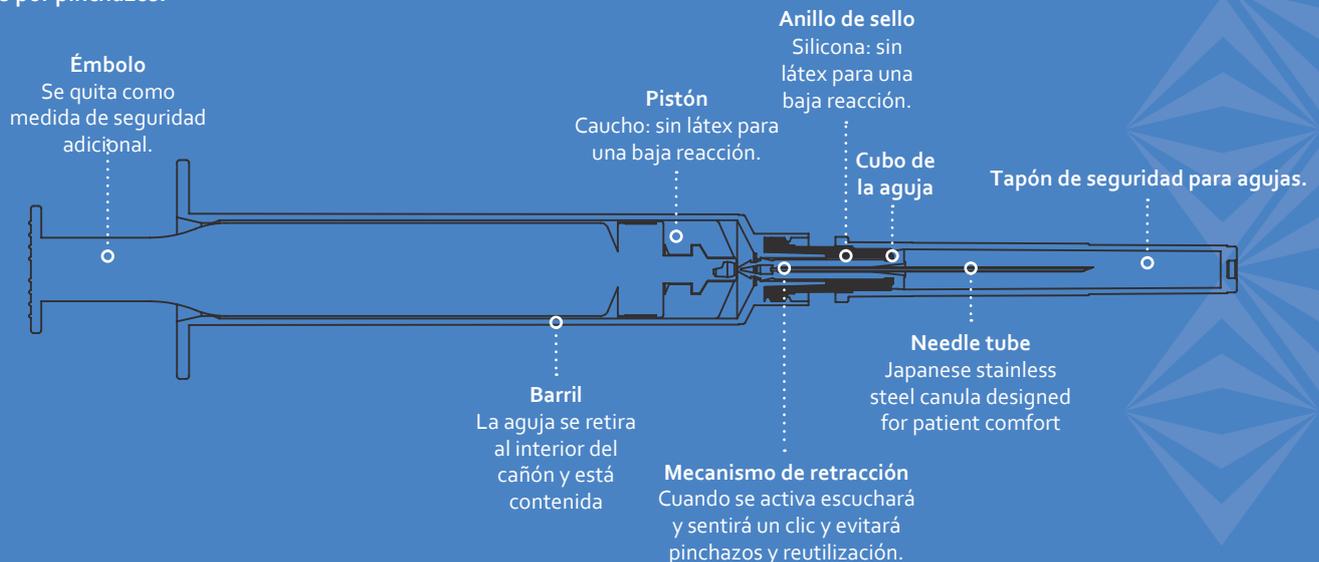

Lista de estándares para la jeringa de seguridad con aguja retráctil ClickZip™ Información del paquete del producto.

Tamaño de la aguja	0.5ml	1ml	2ml	3ml	5ml	10ml
Cantidad Caja / pcs	100	100	100	100	100	100
Caja de cartón / pcs	3,000	3,000	3,000	2,400	1,800	1,200

La jeringa de seguridad con aguja retráctil ClickZip™ está aprobada por la FDA de EE. UU. 510K, tiene la marca CE y está listada en la Organización Mundial de la Salud (OMS). El producto ofrece un espacio muerto reducido (superando los requisitos estándar). Cantidad de orden mínima 100,000 pcs.

Nota:

- Evite la presión excesiva, evite la luz solar directa, el calor extremo, la exposición a la lluvia, la nieve o la humedad.
- Conservar a una temperatura entre + 5 ° C y + 60 ° C.
- Esterilización: gas EO.
- Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación.

Gama de jeringas de seguridad con agujas retráctiles ClickZip™

Aguja	Tamaño		Centro color	Insulina 1ml	0.5ml	1ml	3ml	5ml	10ml
	mm	inch							
30G	13	1/2	Red	✓	✓	✓			
29G	13	1/2	Grey	✓	✓	✓			
27G	8	5/16	Grey	✓	✓	✓			
26G	13	1/2	Dark Red	✓		✓			
26G	16	5/8	Dark Red	✓		✓			
26G	7.9	5/16	Dark Red	✓		✓			
25G	25	1	Orange			✓	✓	✓	✓
25G	16	5/8	Orange				✓	✓	✓
24G	25	1	Purple			✓	✓	✓	✓
24G	38	1 1/2	Purple				✓	✓	✓
24G	16	5/8	Purple				✓	✓	
23G	25	1	Blue			✓	✓	✓	✓
23G	38	1 1/2	Blue				✓	✓	✓
23G	32	1 1/4	Blue				✓	✓	✓
22G	25	1	Black				✓	✓	✓
22G	38	1 1/2	Black				✓	✓	✓
22G	32	1 1/4	Black					✓	✓
21G	38	1 1/2	Green						✓



Lista de estándares para la gama de jeringas de seguridad con agujas retráctiles ClickZip™

La tecnología ClickZip™ pertenece a las normas ISO 13485, ISO 7864, ISO 7886, ISO 8537 como las normas ISO que pertenecen a nuestra gama.

Distribuidor para Estados Unidos:

Biolabs International LLC
Info@biolabsinternational.net
Office: 619-918-5772 619-918-5773



Para obtener instrucciones animadas, visite: numedico.com/clickzip-needle-retractable-demonstration-video/



numedico.com

Numedico
TECHNOLOGIES

Level 21, 91 King William Street, SA 5000 AUSTRALIA

Numedico es el propietario y mayorista de la tecnología ClickZip™ de diseño suizo.